

スプリントカッター  
スプリントコート

歯科技工用カーバイド切削器具

一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001C09082

歯科咬合スプリント用材料

一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001B04003

# SPLINT CUTTER

スプリントカッター

&

# SPLINT COAT

スプリントコート



高耐久性を有したリキッドタイプのコーティング材  
スプリント材の艶だし時間を3分の1に短縮※

※自社試験比較



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.


## SPLINT CUTTER スプリントカッター

●推奨回転数は10,000rpm以下です。

●ハンドピースをシェイクハンドグリッパで握り、バーの回転方向を反時計回りにし、スプリント側を動かしながらカットして下さい。




●作業部左側が綺麗にカットされ、反対側にバリが出ます。

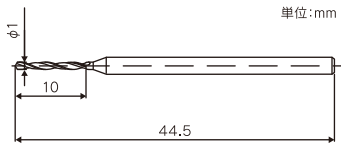

## SPLINT COAT スプリントコート

●適度な強度  
光重合型レジン系表面滑沢材に比べ適度な弾性を有するため、亀裂の発生リスクを低減します。

●塗布時の注意点  
本材の塗布範囲は辺縁部のみに限定して下さい。咬合面等への使用はスプリント材の破折原因となりますのでご使用はおやめ下さい。

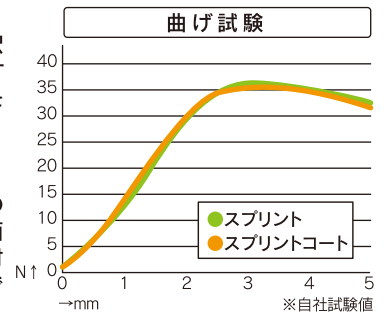

塗布前



塗布後



### STEP.1

スプリントカッターを用いて、成形したディスクの切除を行います。(推奨回転数10,000rpm)



### STEP.2

ドリムポイントを用いて、辺縁部分の形態修正を行います。(推奨7,000rpm)



### STEP.3

スプリントコートを、筆を用いて辺縁部に塗布します。筆先で薄めに塗るのがポイントです。



### STEP.4

光重合を行います。  
【重合時間目安】  
LEDキュアボックスプラス1分  
LEDトレキュア2分



## 商品情報

### スプリントカッター

一般医療機器

歯科技工用カーバイト切削器具

医療機器届出番号: 23B1X10001C09082



※写真は実寸サイズです。

内容量	1本/ケース
最大回転数	30,000rpm以下
標準価格	2,800円

### スプリントコート

一般医療機器

歯科咬合スプリント用材料

医療機器届出番号: 23B1X10001B04003



内容量	30ml
硬化時間	LEDキュアボックスプラス 1分 LEDトレキュア 2分
標準価格	5,000円

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご購入等もお待ちしております) [www.yamahachi-dental.co.jp/](http://www.yamahachi-dental.co.jp/)

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)